


Kit Careta




Incluye:



(1) Correa hipoalergénica

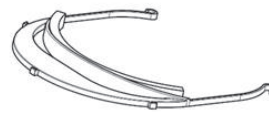

(1) Marco

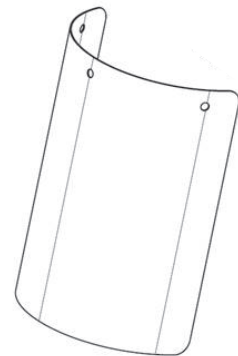

(1) Careta



Ensamble de la Careta

- 1** Remover la película protectora de la careta en la parte de los orificios.
- 2** Posicionar los agujeros de la careta en los tres puntos de montaje del marco.
- 3** Insertar primero el orificio del lado izquierdo, posteriormente el derecho y por último el orificio central en los puntos de fijación del marco.
- 4** Coloque la correa hipoalergénica en la parte posterior del marco
- 5** Coloque la parte posterior del marco sobre su parte trasera de la cabeza y deslice el marco sobre su cabeza hasta que el marco se coloque en su frente y la careta cubra su rostro.